

Anleitung Bezug SISSEL® SITFIT Plus Sitzkissen

Nach Rückmeldung unserer Kunden ist das Beziehen des SISSEL® SITFIT Plus eine schwierige Sache. Die Kissenbezüge sind knapp geschneidert, um Rümpfe zu vermeiden. Wird SITFIT Plus jedoch mit den richtigen Handgriffen bezogen, ist das Beziehen ein Kinderspiel.



Vorbereitung: Wie üblich beim Kissenbeziehen den Bezug zuerst auf die linke Seite stülpen. **Hinweis:** das Kissen soll nicht prall mit Luft gefüllt sein!



Legen Sie das Kissen so auf Ihren Schoß, dass die abgeflachte Seite zu Ihrem Bauch zeigt.



Stülpen Sie nun den Bezug zuerst über die abgeflachte Seite des Sitzkissens.



Stülpen Sie nun den Bezug vorsichtig über das Kissen.



Klemmen Sie das Kissen zum Stabilisieren zwischen die Knie.



Nun das Kissen leicht verformen, um den Bezug auch über die Runde Kissenseite ziehen zu können.



Nun das Kissen im Bezug richtig platzieren



und zurechtzupfen.



Reissverschluss schliessen. Fertig!