

## Instructions pour la housse du coussin d'assise SISSEL® SITFIT Plus

Nous avons reçu le feed-back de nos clients qu'il est difficile d'enfiler la housse du SISSEL® SITFIT Plus. La coupe de cette housse a été ainsi conçue, relativement étroite, afin d'éviter les fronces. Avec le « coup de main » adapté, cela devient un jeu d'enfant.



**Préparation :** Mettez la housse à l'envers (comme il se doit pour enfiler toute housse)  
**Conseil :** le coussin ne doit pas être gonflé complètement !



Posez le coussin de cette façon sur vos genoux, de façon à ce que la partie plate (opposée à la partie arrondie) soit de votre côté.



Maintenant commencez par enfiler la housse par le côté plat du coussin.



Ensuite, faites descendre, avec précaution, la housse simultanément des deux côtés du coussin.



Pour vous faciliter la tâche, serrez le coussin entre vos genoux..



Puis, déformez légèrement le coussin afin de pouvoir tirer la housse vers la partie arrondie.



Repositionnez maintenant le coussin correctement dans la housse...



...et puis maintenant, la housse sur le coussin.



Tirez sur la fermeture-éclair. Terminé !