

## Mode d'emploi pour compresse de Paraffine

La compresse de paraffine a une durée d'utilisation au moins de 5 mois de marche continue - usage correct donné.

### Instruction de sécurité pour usager

Après de la date d'échéance il est recommandé de ne plus user la compresse, même quand il semble d'être prêt à user, parce que la PARAFFIN liquéfié pourrait couler, cela avec une conséquence très désagréable.

La compresse contient un accumulateur thermique de mousse-synthétique avec une préparation de paraffine dure selon DAB 10 et est bouché sous vide.

Ce procédé de fabrication présente le grand avantage d'être plus facile à modeler en comparaison a l'ancienne compresse.

Mesures: 28 x 36 cm Cont. env. 1200 g

### Instruction de sécurité pour usager

La feuille externe tient une résistance à la chaleur maximale de 80 °C. Dans l'armoire pour cultiver la chaleur la compresse est chauffé à env. 50 - 60 °C. La température régulière ne doit pas passer 60 °C.

La compresse de paraffine est fabriqué pour le chauffage dans des meubles spéciaux pour cultiver la chaleur. En cas d'être chauffé dans un bain chaud la compresse ne doit pas toucher le fond da la chaudière, parce que la feuille pourrait d'être dommage par surchauffe. Pour éviter cela poser uns passoire au fond de la chaudière.

### Mode d'emploi

La compresse sera mise sur la partie du corps à traiter, le client sera enveloppé dans une feuille plastique et une couverture de laine. La compresse est utilisé avec grand succès en combinaison avec boue médicamenteux N (1 x usage).

### Instruction de sécurité pour usager

L'usager doit faire attention que la compresse chauffé n'est pas utilisé plus qu'une température prévue. La durée du traitement est environ 25 - 50 minutes.

Pour agrandir la surface de la peau à traiter on peut mettre deux ou plusieurs compresses.

### Nettoyage

Eviter l'usage de détergents caustiques. En respectant le conseil d'entretien on peut augmenter la durée d'utilisation.

### Instruction de sécurité pour usager

L'usager doit porter comme autoprotection des gants de protège-main pendant la préparation de la compresse et du traitement. Ne pas laisser la compresse bouillir dans le bain-marie.

Avant d'appliquer vérifier l'étanchéité. Ne pas chahuter la surface de la compresse. Ne pas laisser la compresse froid tomber par terre à cause d'être endommagé. La compresse est qualifié spécialement pour des armoires à chaleur.

Fabricant/Hersteller: Couppée GmbH D-31812 Pymont

Vente/Vertrieb: Medidor AG – CH 8904 - Aesch