

Mode d'emploi pour compresse de boue thermique

La compresse a une durée d'utilisation de marche continue au moins de 6 mois - usage correct donné.

La compresse contient un porte-chaaleur de boue naturel.

Instruction de sécurité pour usager.

La feuille externe tient une résistance à la chaleur maximale de 80 °C. Dans un bain-marie la compresse peut être chauffée à 50 - 60 °C. La température régulière ne doit pas passer 60 °C. En cas quel la compresse sera chauffé dans un bain-marie, il ne doit pas toucher le fond de la chaudière, parce que la feuille pourrait être dommage par surchauffe. Pour éviter cela mettre une passoire au fond de la chaudière.

Mode d'emploi

La compresse sera mise sur la partie du corps à traiter, le client sera enveloppé dans une feuille plastique et une couverture de laine.

La compresse est utilisée avec grand succès en combinaison avec boue médicamenteux N (1 x usage).

Instruction de sécurité pour usager

L'usager doit faire attention que la compresse chauffée n'est pas utilisée plus qu'une température prévue. La durée du traitement est environ 25 - 50 minutes.

Pour agrandir la surface à traiter on peut mettre deux ou plusieurs compresse.

Nettoyage:

Evitez l'usage de détergents caustiques. En respectant le conseil d'entretien on peut augmenter la durée d'utilisation.

Mesures: 28 x 36 cm Cont. env. 2000 g / 56 x 36 cm Cont. env. 4000 g

Instruction de sécurité pour usager :

L'usager doit porter comme autoprotection des gants de protège-main pendant chauffer La compresse et la préparation du traitement. Ne pas laissez bouillir dans le bain-marie.

Avant d'appliquer la compresse vérifier l'étanchéité par pressant. Ne pas chahuter la surface de la compresse.

Produit par/Hersteller: Couppée GmbH - D-31812 Bad Pyrmont

Vente/Vertrieb: Medidor AG - CH-8904 Aesch